



慢性食物过敏 采样指南



✉收件信息

地址: 广州市黄埔区科丰路31号华南新材料创新园G7-501

电话: 13352854105(博厚医学收样室)

官网: www.biohop.com

(为了您的健康管理效果, 请仔细阅读全部内容, 并完成填写相关信息)

采样指南

► 服务流程

- 请仔细阅读本采样指南，清点包装内物品
- 正确登记检测信息
- 参照血液采集卡使用方法采集样本(采血器为一次性使用)
- 将血液采集卡装入密封袋后，联系物流寄至本封面地址

► 注意事项

- 请仔细阅读血液采集卡使用说明
- 采样视频：恩滴健康公众号→敏康工具→采样说明
- 儿童采样由家长或专业人员协助

信息登记

①扫码关注“恩滴健康”

②登记检测信息

- 1) 从菜单栏“我—采样登记”进入，选择“采样登记”
- 2) 样品编码填写：点击扫描图标后，手机摄像头对准血液采集卡正面条形码，扫码后自动填充
- 3) 填写被检测者信息，点击“提交”



③填写确认码

提交信息后，您将收到4位数
“确认码”，请将此确认码填入
右边空格处！

确认码填写处

— — — —

► 报告查询

方法1：您将在样本送抵本司7个工作日内收到一条由“恩滴健康”发送的手机短信，请根据短信内容操作查询

方法2：在样本送抵本司7个工作日后，进入“恩滴健康”公众号菜单栏“我——报告查询”，输入检测预留手机号码、姓名和验证码查询报告