

### Delivery 4 邮寄



1. 回寄样本: 将已采集样本的采样管放入样本保存袋后封口。(无需寄回: 口腔拭子的后半截断杯、使用说明书)
2. 在扫描完【录单二维码】填写完整信息, 点击一键呼叫成功后, 等待快递小哥上门!



## 口腔样本采样装(标准版) 使用说明书

# MANUAL



SAMPLE COLLECTION KIT

### Reporting 5 报告查询



微信扫一扫, 登录晓飞检小程序, 追踪送检样本状态, 查询检测结果, 获取电子报告单。



如有问题, 请联系客服  
400-1118-525或扫描企业微信添加您的专属客服

QuiCheck  
杭州晓飞检健康科技有限公司  
Tel\_400-111-8525

### Delivery 4 邮寄



1. 回寄样本: 将已采集样本的采样管放入样本保存袋后封口。(无需寄回: 口腔拭子的后半截断杯、使用说明书)
2. 在扫描完【录单二维码】填写完整信息, 点击一键呼叫成功后, 等待快递小哥上门!



## 口腔样本采样装(标准版) 使用说明书

# MANUAL



SAMPLE COLLECTION KIT

### Reporting 5 报告查询



微信扫一扫, 登录晓飞检小程序, 追踪送检样本状态, 查询检测结果, 获取电子报告单。



如有问题, 请联系客服  
400-1118-525或扫描企业微信添加您的专属客服

QuiCheck  
杭州晓飞检健康科技有限公司  
Tel\_400-111-8525


### Overview 1 介绍

口腔样本采样套装

基因检测需通过采集受检者的生物样本, 从样本中提取出目标核酸, 从而进行检测。与传统的抽血采样相比, 口腔采样具有方便快捷、没有疼痛、不会污染、避免感染等优点。

使用本采样套装, 用户可居家自行实现口腔内壁脱落细胞采集, 用于多种基因检测项目。

项目唯一录单码

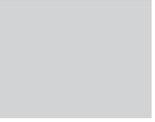

微信扫码采样录单

### Preparation 2 采样前准备

● 耗材包括: 采样拭子×1、样本保存管×1、样本条形码(或已贴样本、样本袋上)、样本袋

1. 取样前用清水漱口1-2次去除口腔中的食物残渣, 咽下口腔中剩余的清水, 漱口后请勿饮食、嚼口香糖等。
2. 采样拭头除了口腔外请不要接触到其他物体, 如碰到其他物体或采样过程中拭头脱落, 请换用新的采样拭子进行采样。
3. 由于不同的口腔拭子样本存在个体差异, 请在采样完成后5天内寄回实验室。

① 为保证检测结果的准确性, 本产品为一次性使用拭子, 请勿重复使用。

### Sampling 3 样本采集



- 撕开口腔采样拭子外包装



- 将拭子伸进口腔内, 在左右内侧颊粘膜处反复擦拭各20次以上, 至棉头已经被唾液充分浸润(应无食物残渣等异物粘附)



- 打开样本保存管盖, 将采样后的拭子放入样本保存管内, 丢弃沿手柄上折痕折断后的手柄。
- 随即盖上样本保存管, 完成样品取样。


### Overview 1 介绍

口腔样本采样套装

基因检测需通过采集受检者的生物样本, 从样本中提取出目标核酸, 从而进行检测。与传统的抽血采样相比, 口腔采样具有方便快捷、没有疼痛、不会污染、避免感染等优点。

使用本采样套装, 用户可居家自行实现口腔内壁脱落细胞采集, 用于多种基因检测项目。

项目唯一录单码

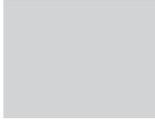

微信扫码采样录单

### Preparation 2 采样前准备

● 耗材包括: 采样拭子×1、样本保存管×1、样本条形码(或已贴样本、样本袋上)、样本袋

1. 取样前用清水漱口1-2次去除口腔中的食物残渣, 咽下口腔中剩余的清水, 漱口后请勿饮食、嚼口香糖等。
2. 采样拭头除了口腔外请不要接触到其他物体, 如碰到其他物体或采样过程中拭头脱落, 请换用新的采样拭子进行采样。
3. 由于不同的口腔拭子样本存在个体差异, 请在采样完成后5天内寄回实验室。

① 为保证检测结果的准确性, 本产品为一次性使用拭子, 请勿重复使用。

### Sampling 3 样本采集



- 撕开口腔采样拭子外包装



- 将拭子伸进口腔内, 在左右内侧颊粘膜处反复擦拭各20次以上, 至棉头已经被唾液充分浸润(应无食物残渣等异物粘附)



- 打开样本保存管盖, 将采样后的拭子放入样本保存管内, 丢弃沿手柄上折痕折断后的手柄。
- 随即盖上样本保存管, 完成样品取样。